

Boston SIMPLUS™ Вишенаменски раствор у једној бочици

Ово упутство садржи важне информације. Молимо прочитајте га пажљиво и сачувајте га за будућу употребу.

Специјално направљен за флуоро силикон акрилатна и силикон акрилатна гаспропустљива контактна сочива

Опис и индикације за употребу:

Boston SIMPLUS™ вишенаменски раствор у једној бочици је иновативни производ за чишћење, дезинфекцију и кондиционирање гаспропустљивих контактних сочива. Одобен је за коришћење са флуоро силикон акрилатним и силикон акрилатним гаспропустљивим контактним сочивима. Boston SIMPLUS™ вишенаменски раствор уклања протеине и липиде са површине сочива и спречава задржавање упорних наслага на сочивима. Овај раствор је такође направљен за испирање сочива, чиме се елиминишу ослобођене површинске насlage са сочива. Мултиполимерни заштитни систем кондиционира сочива обезбеђујући заштиту у току уметања повећавајући уједначено влажење. Патентирани овлаживач одржава квашљивост сочива. Ова формула је направљена тако да обезбеђује умирујући ефекат за ваше очи. Такође садржи заштитни систем који је доказано ефикасан у уништавању штетних организама. Овај раствор је ефикасан и за чишћење и за дезинфекцију, а ипак компатибилан са вашим очима након стављања сочива.

САСТАВ: Стерилни, водени, пуферски раствор који садржи полоксамин, хидроксилалкилфосфонат, борну киселину, натријум борат, натријум хлорат, хидроксипропилметил целулозу, Глукам и заштићен са хлорхексидин глуконом (0.003%) и полиаминопропил бигуанидом (0.0005%).

УПУТСТВО: 

Уклонити штампану фолију са грлића бочице. Не користити ако је штампана фолија оштећена или недостаје.

1. Да би сте обезбедили одговарајућу дезинфекцију, сви доле описани кораци морају се испоштовати: Оперите руке благим сапуном. (Опрез – течни сапуни могу садржати суспензије на уљној бази.)
2. Ставите сочива у празну касету за сочива и напуните свежим Boston SIMPLUS™ вишенаменским раствором. Потопите сочива најмање четири (4) сата или преко ноћи пре ношења.
3. После потапања, извадите сочива из касете за сочива и трљајте пажљиво обе стране сочива са две (2) до четири (4) капи Boston SIMPLUS™ вишенаменског раствора на вашем длану двадесет (20) секунди. Није потребан посебан раствор за дневно чишћење.
4. Испирајте отприлике пет (5) секунди под млазом Boston SIMPLUS™ вишенаменског раствора да елиминишете ослобођене површинске насlage (није потребно испирати водом) и уметните сочива.

5. Темељно очистите унутрашњост касете за сочива врелом водом и просушите на ваздуху пре сваке употребе. Опрез: да би сте избегли контаминацију избегавајте контакт врха бочице са другим предметима. Чувајте бочицу чврсто затворену када не користите раствор.

УПОЗОРЕЊА И МЕРЕ ОПРЕЗА:


- Не користите ако сте алергични на било који састојак овог производа.
- Несме се користити за мека (хидрофилна) контактна сочива.
- Поступак одржавања сочива препоручен од стране вашег очног лекара мора се поштовати. Непоштовање овог поступка може довести до развоја озбиљних инфекција ока.
- Не доводите у контакт врх бочице са другим предметима или вашим очима јер то може да изазове контаминацију раствора или повреду очију.
- Увек оперите руке пре руковања сочивима.
- Никада не користите раствор више пута. Увек користите свеж раствор за чишћење и дезинфекцију сочива.
- Држати бочицу затворену када не користите раствор да бисте избегли контаминацију или испаравање.
- Чувајте на собној температури (1–30°C).
- Не користите лекове за очи заједно са раствором без лекарског надзора.
- Бацити преостали раствор 3 месеца после првог отварања.
- Не користити после истека рока употребе.
- ДРЖАТИ ВАН ДОМАШАЈА ДЕЦЕ.
- Касете за сочива могу бити велики извор контаминације микробима и иритације очију. Касете за сочива треба сваки дан ЧИСТИТИ површински активним средством за чишћење контактних сочива, испрати врелом водом и осушити на ваздуху. Касете за сочива треба често мењати.

ВАЖНО: Ако се појаве иритација и прекомерно сузење, трају или се појачавају или вам је вид ослабљен, престаните са употребом и одмах консултујте вашег очног лекара.



Bausch & Lomb Incorporated
Rochester, NY 14609, U.S.A.



Увозник и дистрибутер за Србију:  Ортоленс д.о.о, Влајкова
199, Лесковац

Made in Italy.

BOSTON и BOSTON SIMPLUS су заштићени знакови Bausch & Lomb Incorporated.

©Bausch & Lomb Incorporated